

PDS Symptomen & Opgeblazen Gevoel

Medisch hulpmiddel

Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS) Symptomen & Opgeblazen Gevoel verlicht pijn die gepaard gaat met een opgeblazen gevoel, druk en volheid.

Capsules met pepermuntsmak.

PDS Symptomen & Opgeblazen Gevoel

- Voor de behandeling van overtollig gas in de maag in verband met PDS Symptomen.
- Snelle verlichting in 30 minuten.
- Verlicht een opgeblazen gevoel, ongemak door gas of pijn veroorzaakt door gasvorming.
- Zacht voor het lichaam.

 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je dit product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing; mogelijk wil je deze later nog eens raadplegen. Neem bij vragen contact op met je arts of apotheker.

Wat zijn PDS Symptomen & Opgeblazen Gevoel en waarvoor worden ze gebruikt?

PDS Symptomen & Opgeblazen Gevoel worden gebruikt om de symptomen van Prikkelbare Darm Syndroom te behandelen zoals winderigheid, ongemakkelijke of pijnlijke druk, volheid en een opgeblazen gevoel.

De capsules zorgen voor een snelle verlichting, door de kleine gasbelletjes die pijn en een opgeblazen gevoel veroorzaken samen te brengen tot grotere belletjes, waardoor opgesloten lucht gemakkelijker je lichaam verlaat.

Wat je moet weten voor het gebruik van PDS Symptomen & Opgeblazen Gevoel

Niet gebruiken:

- Als je overgevoelig bent voor één van de ingrediënten.
- Als je een schildklierandoening behandelt met medicatie zoals levothyroxine.
- Als de verpakking beschadigd is.

Wie kan de PDS Symptomen & Opgeblazen Gevoel gebruiken

 Voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Geschikt voor vegetariërs en veganisten. Simethicone werkt alleen plaatselijk in je darmen. Ook al wordt het gebruik als veilig beschouwd, raadpleeg voor gebruik je huisarts of apotheker als je diabetes hebt, zwanger bent of borstvoeding geeft.

Hoe neem je de PDS Symptomen & Opgeblazen Gevoel in?

De gebruikelijke dosering is:

Neem de capsule(s) in met een glas water, tijdens/ na de hoofdmaaltijd. De maximale dosering per dag niet overschrijden.

Leeftijd	Capsule per dosering	Max. aantal capsules per dag
Kinderen van 6 tot 14 jaar	1 capsule	3 capsules
Volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar en ouder	1 - 3 capsules	9 capsules

 Neem de capsules niet langer dan 30 opeenvolgende dagen in.

Raadpleeg de huisarts of apotheker als:

- Je meer capsules hebt ingenomen dan geadviseerd.
- De symptomen niet verbeteren binnen 5 dagen of verergeren.
- Je niet zeker bent van het verloop van je symptomen.
- Je na inname van de capsule(s) onaangename effecten ondervindt, zoals misselijkheid of verstopping.

Als je een dosis vergeet in te nemen:

Neem de capsule(s) in na je volgende hoofdmaaltijd. Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Ingrediënten

125mg simethicone, pepermuntolie, veganistische softgel capsule (carrageen, maïszetmeel, glycerine, water).

Hoe te bewaren?

 Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 Bewaar de blister in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15-25°C).

 Gebruik de capsules niet meer na de vervaldatum die op de blister en de doos staat.

De inhoud van de verpakking

De verpakking bevat 2 blisters met elk 15 veganistische capsules en een gebruiksaanwijzing.

Meld vermoedelijke bijwerkingen of incidenten, of als het product defect of vervalst lijkt, bij de distributeur, fabrikant of de bevoegde gezondheidsautoriteit. Jouw melding helpt ons om onze producten veilig en effectief te houden.

PDS Symptomen & Opgeblazen Gevoel



Medical Brands Developments BV
Weesperstraat 114 | 1112 AP Diemen | Nederland



Vitalize Products BV
Galvaniweg 15 | 4207 HL Gorinchem

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in januari 2025

Uitleg symbolen:



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



Fabrikant



Distributeur



Medisch Hulpmiddel



Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.



Het product moet worden bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).



Het product kan niet gebruikt worden na de houdbaarheidsdatum.



Batchnummer van het product.



Uniek Product Identificatienummer



Er moet speciale aandacht worden besteed aan waarschuwingen.



CE-markering met het viercijferige identificatienummer van de aangemelde instantie die betrokken is bij de conformiteitsbeoordelingsprocedure. De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese medische regelgeving.